

GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ (GUIAC METOD)



Hidrojen peroksit varken kanda heme grubu (özellikle hemoglobin) 30 ila 180 saniye arasında alfa-guaakonik asidi (Guayakum ağaç türlerinden üretilen bir madde olan Guayakum reçinesinin bir bileşeni) mavi-yeşil renkli kinon haline getirerek oksidize eder.

Kart testi, doğal Guaiac reçinesi ile emprenye edilmiş özel bir filtre kağıdı ve hidrojen peroksit içeren bir renk reaktifi içermektedir.

Hidrojen peroksit ilavesinden sonra oluşan mavi-yeşil renk, gizli kanın saptanmasına yardımcı olur.

KULLANIM AMACI

Türklab'ın Gikan kart testi, gastrointestinal hastalıkların saptanmasına ve teşhis edilmesine yardımcı olarak dışkıda gizli kanın kalitatif saptanmasına yönelik bir kart testidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 96.0%
- Özgünlük: 95.0%



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
GİKAN	KARTLAR	DIŞKI	RENK REAKTİFİ	100	Kart Test Cihazı + Renk Reaktifi + Aplikatör + Kullanım Talimatları